

●● dry-sun uv 2.1

Descripción del producto:

dry-sun uv 2.1 es una estación de secado electrónica para tratamientos higiénicos provista de una luz UV-C adicional. Sirve para secar y cuidar todo tipo de audífonos y moldes otoplásticos.



Secado perfecto mediante convección de aire caliente



Tratamiento higiénico mediante luz UV-C para proteger su salud



Manejo muy sencillo mediante botón táctil



Fácil portabilidad gracias al conector USB-C estándar



Ajuste automático del espacio y la temperatura



Desconexión automática tras el secado de confort



Todas las funciones monitorizadas mediante microprocesador



Producto de máxima calidad con 2 años de garantía



Bajo consumo energético, tratamiento cuidadoso y absolutamente seguro

Datos técnicos:

- Secado: Temperatura de secado 50 °C +/- 3 °C mediante convección térmica
- Botón táctil: Si se toca 1 vez, activa el secado de confort durante 4 horas
Si se toca durante 3 segundos, desconecta manualmente el aparato (fuera del modo UV-C)
- Desconexión: Automática después de 4 horas
- Tratamiento higiénico: 2 x 4 minutos de luz UV-C con una longitud de onda de 253,7 nm
Con ello se elimina hasta el 99,9% de todos los gérmenes y bacterias habituales
Intensidad máxima de UV-C 400 µW/cm²
- Funcionamiento: Conexión USB-C de 5 V mediante la fuente de alimentación conmutada USB o la interfaz USB 2.0 suministrada
- Seguridad: Monitorización de la tensión de entrada con < 4 V y > 6 V
Desconexión automática de seguridad a una temperatura > 70°C
- Consumo de corriente: Potencia media 2,5 W
Potencia máxima (UV-C) 4 W
Potencia en stand-by < 0,1 W

Alimentación eléctrica:

Fuente de alimentación conmutada electrónica USB (clase VI)

- Entrada: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Salida: 5 V, 1A, DC
- Tipo: EU / UK / US / JP / AUS disponible

Contenido del embalaje:

dry-sun uv 2.1
Fuente de alimentación USB
Cable con USB-A y USB-C de 1,0 m
Cubierta dura
Instrucciones de uso

Dimensiones/peso:

110 x 90 x 35 mm
(largo x ancho x alto)
168 g


Garantía:

LOT 2 años

Identificación:

Núm. de reg. WEEE:
045445-002-1720-1720
UDI-DI 4260277010478

Fabricante:

 flow-med GmbH
www.flow-med.com



Distribución

audifon GmbH & Co. KG · Werner-von-Siemens-Straße 2 · D-99625 Köllda · Alemania
Tel. +49-3635-4056-590 · Fax +49-3635-4056-589 · contact@audifon.com

